




1- Se laver les mains



2- Saisir le masque par le bord dans le sachet

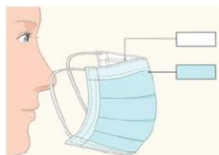

3- Déplier le masque et le tenir par le haut



4- Le mettre sur le nez et la bouche en passant les élastiques derrière les oreilles



5- Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez



6- Déplier le masque jusque sous le menton

- S'assurer que le masque **couvre le nez, la bouche et le menton**
- **Ne pas manipuler** le masque lorsqu'il est en place
- **Changer de masque** toutes les 4h ou dès qu'il est humide
- **Jeter le masque** dans un sac d'ordures ménagères ou DASRI si précautions complémentaires
- **Se frictionner les mains** avec la SHA après l'avoir retiré